

ATTAQUE GEL - Mine ve dentin asitlemesinde kullanılan 37%'lik Orto Fosforik Asit



Kod: 7221

Paketleme:

Ürün, jel formunda sunulmuştur.
ATTAQUE GEL: 2x3 g lik şırınga

Bileşenleri;

37% Orto fosforik asit, methylparaben, silisyum dioksit, blue dyein (CI42015) ve deionised water.

ENDİKASYONLARI:

Mine ve/veya dentin için, Kompozit materyallerin, restorasyonlar, köprüler, simanlama ve yapıştırımda çok iyi tutunmalarını sağlar.

TEKNİK BİLGİ

15 ila 30 saniye boyunca uygulanan %37 lik fosforik asit, mine ya da dentinin dağlanması için en çok kullanılan ve en etkili yöntemdir. Dentinde kullanılması smear tabakasının hızlı ve tam olarak kaldırılmasına yardım eder, dentin tübülillerinin ağızlarını açarak kompozit reçinesinin daha derine penetre olabilmesine olanak verir ve dentin ile dentin sıvısında mevcut olan kalsiyum ve fosfat iyonlarının fosforik asit ile reaksiyona girebilmesi olgusu, asidin dentin üzerindeki toksik etkisini nötralize eder. Bu yolla mikro-mekanik retansiyonun artırılmasını ve marjinal mikro-infiltrasyonun azaltılmasını sağlar.

ATTAQUE GEL'in renklendirilmiş olması, mükemmel bir şekilde görülmesini sağlar, böylece istenmeyen alanlara uygulanması engellenir; kıvamı, jelin hassas şekilde konumlandırılabilmesine olanak verir; uygulama uçlarıyla birlikte, kullanımı kolay dispenser şırınga içindedir.

KULLANMA TALİMATLARI

1. Profilaksinin ardından, preparasyon bölgesini yıkayıp kurulayınız. Bir rubber dam ile izolasyon yapılması önerilir;
2. ATTAQUE GEL'i tedavi edilecek bölgelere uygulayınız ve dentinde 15 saniye, minede 30 saniye reaksiyon süresi veriniz;
Dikkat: Çok derin kavitelere ATTAQUE GEL uygulamasından önce kalsiyum hidroksid veya cam iyonomer siman ile koruma tedavisi yapılmalıdır.
Flor uygulanmış dişlerde ikinci bir uygulama gerekli olabilir.
3. Etching bölgesini 30 saniye süreyle yıkayınız;
4. Yağdan arındırılmış hava ile kurutunuz;

ÖZEL ÖNERİLER:

- Deriye veya mukozaya temas ettirmekten sakınınız. Temas etme durumunda su ile iyice yıkayınız.
- Kullandıktan sonra plunger'ı çekiniz (basıncı serbest bırakma).
- Yutmayınız.

KARAKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER

- Kolay uygulama, (jel formunda olmasından dolayı)
- Kolay uygulama, (paketlemenin şırıngalarda uygulama uçları ile birlikte olmasından dolayı)
- Kolay görünebilme, (ürünün mavi renginden dolayı)
- Yeterli jel akışkanlığı, materyalin sadece kondisyonel alanda sınırlı kalmasına izin verir.

ÖZEL TAVSİYELER:

ATTAQUE GEL, içeriğindeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.