

BIOFORTY - Işıklı Sertleşen Kompozit Yüzey Sealantı



Kod: 7709

Paketleme: Ürün, likid formunda sunulmuştur.

BIOFORTY: 1x5 ml şişe

Bileşenleri;

Bisphenol A glicidilmethecrilate (33%) ; dimethacrylate groups; silicium dioxide ve cathalysts.

ENDİKASYONLARI:

BIOFORTY posterior dişlere yapılan kompozit rezin ve cam iyonomer dolguların, bitim ve polisaj işlemlerinden sonra, dolguların düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Amalgam dolgularda, dolgu kenarlarının sızdırmaz şekilde kapatılması için endikedir.

TEKNİK BİLGİ

- BIOFORTY, dolgular için kullanılan bir oklüzal sealant sistemidir.
- Işıklı sertleşen materyal.
- Kompozit, cam iyonomer ya da amalgam dolguların üzerinde kullanılabilir.
- Aşırı olmayan viskozitesi, ürünün diş dolgusunun ara yüzeylerine akmasına olanak sağlar, mikro sızıntı bölgelerini örterek bu dolguların ömürlerini uzatır.
- Var olan dolgulara da ayrıca uygulanabilir ve hastanın her muayenesinde (yaklaşık her 6 ayda bir) tekrarlanmalıdır.

KULLANMA TALİMATLARI

1. Restorasyonun bitirilmesinden sonra (bitim ve polisaj) diş dolgusunun bütün ara yüzeylerinde 30 saniye süreyle pürüzlendirme işlemine başlayınız (örn. ATTAQUE GEL ile);
2. Hazırlanmış bölgeyi 30 saniye boyunca yıkayınız;
3. İnce bir tabaka BIOFORTY uygulayınız;
4. 20 saniye süreyle ışıkla sertleştiriniz;
5. Oklüzyonu kontrol ediniz.
6. Ortodontik tellerin yerleştirilmesi, braketlerin sabitlenmesinin hemen ardından yapılabilir.

NOT:

Eski kompozit restorasyonların varlığı durumunda, diş ve dolgu yüzeyinden protein tabakasını ve kontamine ajanları uzaklaştırmak için pomza ve su ile profilaksi yapınız ve ardından aynı talimatları yerine getiriniz.

ÖZEL TAVSİYELER:

- Henüz ışınlanmamış ürünün deri ile teması irritasyona sebep olabilir.
- Gözle temas durumunda suyla iyice yıkayınız ve doktorunuza danışınız.
- Cilde temas durumunda sabun ve su ile iyice yıkayınız.
- Kaza ile üründen büyük bir miktar yutulması durumunda KUSTURMAYA ÇALIŞMAYINIZ ve bir doktora danışınız.
- Ürünün manipülasyonu esnasında latex eldiven, dispoziibl mask eve koruyucu gözlük kullanılması tavsiye edilir.

MUHAFAZA ETME

Buzdolabında 2 – 22 °C arasında muhafaza edilmesi önerilir. Kullanımdan önce oda sıcaklığına gelene kadar, buzdolabı dışında bekletiniz.

KAREKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER

- Restorasyonların ömrünü uzatır
- Marjinal kaçak riskini düşürür
- Restorasyonlara daha güzel (estetik) görüntü verir
- Kullanımı hızlı ve kolaydır

ÖZEL TAVSİYELER:

BIOFORTY, içeriğindeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.