

BIOSEAL Auto - Kendi sertle en pit ve fissür örtücü material



Kod: 7493

Paketleme: Ürün, pat formunda sunulmu tur.

1x2,5g i ede Kendi Sertle en BIOSEAL (baz) + 1x2,5g i ede Kendi Sertle en BIOSEAL (katalizör) + 1x3g ATTAQUE GEL ırına + 10 adet karı tırma godesi + 20 adet tek kullanımlık fırça.

Bile enleri;

Bisphenol A Glycidylmethacrylate (35,60%); methacrylate groups; silicium dioxide; sodium fluoride; calcium fluoride ve cathalyst.

END KASYONLARI:

BIOSEAL, hassas bölgelerde çürük önlemesi yapm ası için, pit ve fissürlerin örtülenmesinde endikedir.

Flor salınımı yapan kimyasal ve mekanik bir ajan gibi davrandı ndan, çürük önlenmesi ve kontrolünde tamamlayıcı olarak endikedir.

TEKN K B LG

Di lerin oklüzal yüzeylerine uygulanan Nano Partikül bir üründür. Ürün, fissür ve pitlerin üzerinde, onları çürüklere kar ı koruyan sa lam ve düzenli bir film tabakası olu turur.

Ayrıca, içeri indeki sodyum florid ile birlikte tamamlayıcı bir profilaktik etki gösterir. Oklüzal çürükleri azaltmadaki performansları göz önüne alındı nda, sealantların kullanılması iddetle tavsiye edilir.

Flor konsantrasyonları:

- Sodyum Florid % 2,42= % 1,09 Florid iyonu.
- Kalsiyum Florid % 9,4= % 0,19 Florid iyonu.

KULLANMA TAL MATLARI

Örtücülü ünün etkinli i, sealantın, üze rine uygulandı ı mineye do ru ekilde penetre olmasına ba lıdır.

1. Pit ve fissürler de dahil, oklüzal yüzeyleri pomza ve su ile temizleyiniz;
2. Sealantlanacak di leri, pamuk rulolar ya da rubber dam kullnarak izole ediniz;
3. Mineyi 30 saniye asitle (örn. ATTAQUE GEL) pürüzlendiriniz;
4. Asitleme artıklarını uzakla tırmak için 30 saniye su ile yıkayınız;
5. iyice kurulayınız, temizlenmi yüzeylerdeki nem, rezinin bu bölgelere penetre olmasını engelleyecektir;
6. E er yüzey saliva ile temas ederse, kurulayınız ve 10 sa niye süreyle yeniden asitleyiniz, yıkayıp kurulayınız;
7. Hazırlanmı bölge tebe ir beyazı ve mikro porözitesiz bir görünümde olmalıdır; bu sa lanamamı sa, i lemi tekrarlayınız;
8. Ürünü, bütün pit ve fissürler boyunca, hava kabarcı ı kalmayacak ekilde uygulayınız;
9. Sealant uygulanmı bütün yüzeylere, 20 saniye süreyle ık veriniz;
10. Oklüzyonu kontrol ediniz ve fazla materyali a ındırınız;
11. Bir sond ile yapı kanlı ını kontrol ediniz.

KONTROL VE YEN DEN UYGULAMA:

Uygulanmı olan sealantı her altı ayda bir kontrol ediniz. E er tamamen yok olmu sa, üreticinin talimatları do rultusunda yeni bir uygulama yapılmalıdır. E er sealantın bir bölümü hala duruyorsa, bir sond ile sa lamlı ını kontrol ediniz. Sıkıca yapı ık durumdaki sealantın üzerine yeni bir tabaka daha ürün ilave edilebilir.

ÖZELL KLE D KKAT ED LECEKLER.

Etching jelinin (örn. ATTAQUE GEL) deri, oral mukoza ya da dentine direkt olarak temas etmesinden sakınınız. Etcing jelinin bu bölgelere teması halinde su ile iyice yıkayınız. YUTMAYINIZ.

KAREKTER ST KLER / ÖZELL KLER

- 2 tür flüroid içerir (Sodyum ve Kalsiyum flüroid). Bu ürünün (Sodyum Flürod) daha hızlı inisiyal etkisine izin verir ve uzun süreli ve daha derin etki (Kalsiyum FI üroid)
- Radyopak materyaldir
- Di e uygulanmasından sonra materyalin yeterli vizualisyonuna izin verir, Esteti in kalitesini etkilemez
- Mükemmel akı kanlıktadır

ÖZEL TAVS YELER:

BIOSEAL, içeri indeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti oldu u bilinen h astalarda kullanılmamalıdır.