

BIOSEAL Vitroc ceramic - I ıkla sertle en, pit ve fissür örtücü material



Kod: 7492

Paketleme: Ürün, pat formunda sunulmu tur.
2x2,5g ı ıkla sertle en BIOSEAL VITROCERAMIC ırına
1x3g ATTAQUE GEL ırına + 5 uygulama ucu + 5 fırça

Bile enleri;

Bisphenol A Glicidilmethacrylate (21,73%); dilmethacrylate groups; Silicium dioxide; Vitro-ceramic filler; Sodium fluoride; Calcium fluoride ve Cathalyst.

END KASYONLARI:

BIOSEAL VITROCERAMIC, hassas bölgelerde çürük önlemesi yapması için, pit ve fissürlerin örtü lenmesinde endikedir. Flor salınımı yapan kimyasal ve mekanik bir ajan gibi davrandı ndan, çürük önlenmesi ve kontrolünde tamamlayıcı olarak endikedir.

TEKN K B LG

Di lerin oklüzal yüzeylerine uygulanan Nano Partikül bir üründür. I ıkla sertle tirildi inde ürün, fissür ve pitlerin üzerinde, onları çürüklere kar ı koruyan sa lam ve düzenli bir film tabakası olu turur.

Ayrıca, içeri indeki sodyum florid ile birlikte tamamlayıcı bir profilaktik etki gösterir. Oklüzal çürükleri azaltmadaki performansları göz önüne alındı nda, sealantların kullanılması iddetle tavsiye edilir.

Flor konsantrasyonları:

- Sodyum Florid % 2,42= % 1,09 Florid iyonu.
- Kalsiyum Florid % 9,4= % 0,19 Florid iyonu.

KULLANMA TAL MATLARI

Örtücülü ünün etkinli i, sealantın, üzerine uygulandı ı mineye do ru ekilde penetre olmasına ba lıdır.

1. Pit ve fissürler de dahil, oklüzal yüzeyleri pomza ve su ile temizleyiniz;
2. Sealantlanacak di leri, pamuk rulolar ya da rubber dam kullnarak izole ediniz;
3. Mineyi 30 saniye asitle (örn. ATTAQUE G EL) pürüzlendiriniz;
4. Asitleme artıklarını uzakla tırmak için 30 saniye su ile yıkayınız;
5. yice kurulayınız, temizlenmi yüzeylerdeki nem, rezinin bu bölgelere penetre olmasını engelleyecektir;
6. E er yüzey saliva ile temas ederse, kurulayınız ve 10 saniye süreyle yeniden asitleyiniz, yıkayıp kurulayınız;
7. Hazırlanmı bölge tebe ir beyazı ve mikro porözitesiz bir görünümde olmalıdır; bu sa lanamamı sa, i lemi tekrarlayınız;
8. Ürünü, bütün pit ve fissürler boyunca, hava kabarcı ı kalmayacak ekilde uygulayınız;
9. Sealant uygulanmı bütün yüzeylere, 20 saniye süreyle ık veriniz;
10. Oklüzyonu kontrol ediniz ve fazla materyali a ındırınız;
11. Bir sond ile yapı kanlı ını kontrol ediniz.

KAREKTER ST KLER / ÖZELL KLER

- 2 tür flüroid içerir (Sodyum ve Kalsiyum flüroid). Bu ürünün (Sodyum Flürod) daha hızlı inisiyal etkisine izin verir ve uzun süreli ve daha derin etki (Kalsiyum Flüroid)
- I ıkla sertle ir ve radyoopak materyaldir
- Di e uygulanmasından sonra materyalin yeterli vizualisyonuna izin verir, Esteti in kalitesini etkilemez
- Mükemmel akı kanlıktadır

KONTROL VE YEN DEN UYGULAMA:

Uygulanmı olan sealantı her altı ayda bir kontrol ediniz. E er tamamen yok olmu sa, üreticinin talimatları do rultusunda yeni bir uygulama yapılmalıdır. E er sealantın bir bölümü hala duruyorsa, bir sond ile sa lamlı ını kontrol ediniz. Sıkıca yapı ık durumdaki sealantın üzerine yeni bir tabaka daha ürün ilave edilebilir.

ÖZELL KLE D KKAT ED LECEKLER.

Etching jelinin (örn. ATTAQUE GEL) deri, oral mukoza ya da dentine direkt olarak temas etmesinden sakınınız. Etching jelinin bu bölgelere teması halinde su ile iyice yıkayınız. YUTMAYINIZ.