

DOUBLE DISPOSABLE TRAYS - Alt ve üst çene için flor jel uygulama kaşıkları



Paketleme:

24, 50, 100'lük kutu, boyutlar: küçük, orta, büyük ve asorti.

ENDİKASYONLARI:

Flor jel uygulama kaşıkları.

TEKNİK BİLGİ

Flor jeli uygulamaları için poliüretan köpükle kaplanmış polistiren kalıplar. Materyal, dental arka uyum sağlamasını kolaylaştıran bir esnekliğe sahiptir. İç bölgelerinde bulunan köpük, dişlerle teması artırır ve kalıbın içine uygulanan flor jelinin etkinliğinin artmasını sağlar. İkili formu, eş zamanlı olarak alt ve üst diş dizilerinde aynı anda flor uygulanabilmesine olanak sağlayarak, zamandan tasarruf ve hastaya daha fazla konfor sağlar.

Kalıpla topikal flor uygulamasının, florun etkisini derinleştirecek şekilde, flor/mine arasında uzun süren bir kontak sağlanarak yapılması, özellikle tavsiye edilir.

KULLANMA TALİMATLARI

1. Pomza tozu ile profilaksi ve yıkama.
Kurulayınız;
2. Uygun boyuttaki kalıbı seçiniz;
3. Kalıbın iç yüzeylerine flor koyarak yayınız;
4. Kalıbı hastanın ağızına yerleştiriniz ve önerilen süre boyunca bekleyiniz;
5. Kalıbı çıkarınız ve flor artıklarını uzaklaştırınız ve hastaya 30 dakika hiç bir gıda almamasını söyleyiniz.

KARAKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER:

- Flor jelinin uygulamasında kolaylık sağlar.
- Çift taraflı olduğu ve diş dizilerinin her ikisine de aynı anda uygulama olanağı verdiği için zamandan tasarruf sağlar.
- Diş dizilerine daha iyi adaptasyon için esnek materyalden üretilmiştir.