

EUGENOL – Ojenol, Geçici dolgu materyali



Kod: 7525

Paketleme: Ürün, likid formunda sunulmuştur.
EUGENOL: 1 x 20g şişe.

Bileşenleri;
Eugenol U.S.P (99 a 100,5%).

TANIMLAMA:

Çinko Oksit ile karıştırıldığında genelde kaide maddesi ve geçici dolgu olarak kullanılan bir siman oluşturan bir likittir.

ENDİKASYONLARI:

Çinko Oksit tozu ile EUGENOL reaksiyonu, dental uygulamalarda:

Dentin – pulpa koruması (kaide) için, pulpa enflamasyonunun tedavisinde yardımcı pulpa yatıştırıcısı olarak, geçici dolguların yapımı için, kök kanalının doldurulması, inleylerin, kuron ve köprülerin geçici ya da kalıcı olarak simantasyonu için ve cerrahi siman olarak kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

Öjenol, karanfil yağından elde edilir. Sarı, renksiz ya da soluk renkli bir sıvıdır.

Havayla temas ettiğinde kararır ve yoğunlaşır. Karanfil gibi kokar. Pratikte suda çözünmez. Alkol, kloroform, eter ve yağlarda çözünür, pulpa üzerinde uyuşturucu etkisi vardır (sakinleştirir), geçici dolgu maddesi olarak çok kullanılır. Analjezik, antiseptik ve balzam, antienflammatuar ve sikatrizasyon özellikleri sergiler.

KULLANMA TALİMATLARI

Bir karıştırma plağı üzerine maksimum 2 ya da 3 damla EUGENOL damlatınız, Çinko Oksit ilave ediniz ve istenilen kıvam elde edilinceye kadar karıştırınız.

KARAKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER:

- Ağrı kesici bir maddedir;
- Biyo-uyumludur;
- Suda çözünmez.

ÖZEL TAVSİYELER

- EUGENOL, içeriğindeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.
- EUGENOL, Polimerize olmuş kompozit materyallerle birlikte kullanılmamalıdır.
- Mukozaya temas ettiğinde, acı ve yanma hissi verir.
- EUGENOL, deri irritasyonuna sebep olabilir
- Hastalarda, haftalarca kullanılacak cerrahi simantasyon için EUGENOL'un kötü ve rahatsız edici tadı gözönüne alınmalıdır, bu mide rahatsızlıklarına sebep olabilir.
- Uterus'ta kasılmalar provoke olduğunda, hamileler için yüksek kontrendikedir.