

EVIPAC Liquid - Bakteri Plak İndikatörü



Kod: 7400

Paketleme:
EVIPAC SOLÜSYONU 10ml

TANIMLAMA:

Dişlerin bakteriyel plakla kaplanmış yüzeylerine yapışan bir solüsyondur..

ENDİKASYON:

Bakteriyel plağı görünür hale getiren bir solüsyon olarak kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

Bazik Füsün bazlı olan EVIPLAC, görünüşte temiz olan dişlerde, bakteriyel plak formasyonlarını, dişlerle kontrast oluşturacak bir renkte boyayarak görünür hale getirme işleminde, daha iyi bir performansı garanti eder.

Böylesi bir araç, yalnızca plağın görünür hale getirilmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda oral temizlik eğitimine de yardımcı olur.

KULLANMA TALİMATLARI

I- 10ml EVIPLAC Solüsyonu (Konsantre Topikal Solüsyon):

1. Bir pamuk pelete ürünü emdiriniz bütün diş yüzeylerine uygulayınız;
2. Ardından, artıkları uzaklaştırmak için su ile yıkayınız;

II- 500ml EVIPLAC Solüsyonu (Gargara):

1. Kullanıma hazır solüsyon.

NOT:

- Boyanan bütün bölgeler, diş fırçası ve diş ipi kullanılarak tamamen temizlenmesi gereken bakteriyel plak varlığını işaret eder.
- Her gün ve tercihan son fırçalamadan önce kullanılabilir.

KARAKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER:

- Fuksin maddesinin etkisiyle bakteriyel plak boyası
- Oral hijyen için Tamamlayıcı Ajandır.

