

G.H.F - Dentin hassasiyet giderici



Kod: 7708

Paketleme: Ürün likid formunda sunulmuştur.

G.H.F.: 1x5 ml şişe + 10 adet tek kullanımlık fırça.

Bileşenleri;

Glutaraldehyde(5,1%),HEMA (36,1%), Sodium Fluoride ve Deionized Area.

TANIMLAMA:

Aşırı duyarlı dentini desensitize edici etkisi olan bir üründür.

ENDİKASYON:

Özellikle kole bölgelerinde, aşırı duyarlı dentinin tedavisi ve korunması için kullanılır. Restorasyonların altına uygulanabilir.

Ölçü almadan önce (soğuğa hassas olduğu bilinen hastalarda) postoperatif hassasiyeti gidermek, scaling ve planlama sonrasında, bakteriyel plağı azaltmak, abrazyon ve erozyonun neden olduğu servikal aşınmanın ilerlemesini yavaşlatmak için kullanılır.

TEKNİK BİLGİ

G.H.F. Hassasiyet giderici, ağrı verici uyarıların pulpaya ulaşmasını önleyen bir bariyer oluşturacak şekilde dental tübülilerin üzerini kapatıp onları yok ettiği için, hassas dentinlerde özellikle endikedir. Bu koruma, ilk altı ayda yoğundur ve bu süreden sonra yeni bir uygulama gereklidir. Dentin içine penetre olan ve onu servikal erozyona karşı güçlendiren nanometrik doldurucular ihtiva eder. Hasta, uygulamanın hemen ardından rahatlar ve uygulama sonrasında sıvı ya da katı gıda alımında bir kısıtlama yoktur. Işıklı sertleşmeyen bir materyaldir ve diş yüzeyinde bir tabaka oluşturmaz. Bütün dolgu ve adheziv sistemlerle uyumludur, bu ajana ihtiyaç gösteren simantasyon ya da restorasyon sistemlerinde primer olarak kullanılabilir.

Bileşiminde yer alan flor, dentin hassasiyeti giderilmesinde ilave bir ajandır.

KULLANMA TALİMATLARI

I Hassasiyet için:

1. Bölgeyi pomza tozu ve su ile temizleyiniz;
2. G.H.F.hassasiyet giderici uygulanacak bölgeyi izole ediniz;
3. Emici kağıt ya da pamuk kullanarak kurulayınız;
4. Bir plaka üzerine bir damla G.H.F. hassasiyet giderici damlatınız ve dispoziibl bir fırça kullanarak bütün yüzeylere sürünüz;
5. 30 saniye bekleyiniz ve hava su şırıngasıyla hafifçe kurulayınız;
6. Su ile yıkayınız.

II Restorasyonlar üzerine uygulama:

1. Mukozaları korumak için rubber dam;
2. Üretici firmanın talimatları doğrultusunda pürüzlendirme;
3. Bölgeyi su ile yıkayınız ve hafifçe hava tutarak dentin üzerindeki nemi uzaklaştırınız;
4. Bir damla G.H.F. hassasiyet gidericiyi karıştırmak için bir plaka üzerine damlatınız ve bir fırça kullanarak bölge üzerine sürünüz;
5. 30 saniye bekleyiniz ve hafif bir hava uygulamasıyla kurulayınız;
6. Üreticinin talimatları doğrultusunda bonding ajanını (örn. MASTER BOND) uygulayınız ve restorasyonu

bitiriniz.

ÖZEL ÖNERİLER

G.H.F. Desensitizer deri ve mukoza ile temas ettirilmemelidir; göz ile temasında, hemen bol su ile yıkanmalı ve hekimin tavsiyesi dinlenmelidir; İnhalasyon durumunda irritasyona sebep olabilir; Kavite pupanın kenarında olduğu zaman, G.H.F. Desensitizer uygulamadan önce, dentin astar maddesi ile hazırlanmalıdır; eldiven, koruma gözlüğü ve maskesi kullanılması önerilir.

ÖZEL TAVSİYELE

G.H.F., içeriğindeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

KAREKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER

- Işıkla sertleşme ihtiyacı yoktur
- Uygulaması kolaydır
- Dental yüzeyde formlar kaplanmaz
- Hızlı ve uzun süreli etki