

INTERIM Kit - Geçici Dolgu (restorasyon) materyali



Kod: 7120 – Likid

Kod: 7125 – Toz

Paketleme: Ürün, toz ve likit formunda sunulmuştur.

INTERİM Toz: 1 x 38 g şişe.

INTERİM Likit: 1 x 15 ml şişe.

Bileşenleri;

INTERİM TOZ: Çinko Oksit ve Akrilik Rezın

INTERİM Likit: Ojenol ve Asetik Asit Glasial

TANIMLAMA:

Kaviteelerde kaide maddesi ve geçici dolgu olarak kullanılan bir simandır.

ENDİKASYONLARI:

INTERİM, kavitelere kaide konması ve dişlerin uzun bir süre için geçici olarak doldurulmasında endik edir. Endodonti seansları arasında kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

Donma zamanı yaklaşık 5 ila 8 dakikadır (toz/likit oranı ağırlık olarak 8/1)

Hidrojenik konsantrasyonu, ürün diş yerleştirildiği anda bile pH 7 – 8 değerlerine sahiptir, bu nedenle diş hekimliğinde kullanılan en az irrite edici simanlardan biridir.

KULLANMA TALİMATLARI

Toz/likid oranı, ağırlık olarak 8/1 dir.

1. Düz bir cam plaka üzerine toz ve likid çıkartınız ve tozu kabaca üç eşit parçaya bölünüz;
2. Tozun 1/3 ünü likid ile karıştırınız ve 20 saniye boyunca karıştırma işlemine devam ediniz;
3. Tozun 1/3 ünü daha ekleyiniz ve 20 saniye daha karıştırınız;
4. Son olarak, geriye kalan 1/3 lük bölümü de ekleyiniz ve tamamını 20 saniye daha , cam plakaya az miktarda yapışkanlık gösteren bir pat elde edinceye kadar karıştırınız;
5. Hollembach kondenseri kullanarak yeterli miktarlarda ürünü, çalışma süresi boyunca kaviteye yerleştiriniz. Fazlalıklar, Hollembach ekskavatörü veya düşük hızda çelik frezler kullanılarak elimine edilebilir.

ÖZEL TAVSİYELER:

Ürün formülasyonunda yer alan komponentlerden herhangi birine duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde INTERİM kullanılmamalıdır.