

N-RICKERT KIT - kanal dolgu simanı



Kod: 7150

Paketleme:

1X10 ml likid + 1x10 g toz

Bileşenleri;

N-RICKERT Toz: Zinc Oxide (48%), Staybylite resin (hydrogenated) ve Silver
N-RICKERT Likid: Eugenol (70%), balsam of Canada ve Thymol.

ENDİKASYONLARI:

Kök kanal dolgu simanı

TEKNİK BİLGİ

Kanal doldurma simanı olan N-RICKERT, ilk seçilecek simanlardan biridir ve iyi bir endodontik simanın bütün gerekliliklerini karşılar:

- İyi yapışkanlık,
- İyi penetrasyon,
- Kanal duvarlarına adaptasyon (ilk 24 saatte yüksek akışkanlık),
- Net radyoopasite (gümüş),
- Kolay uzaklaştırılma (70% GL alkolle),
- Antibakteriyel etki (eugenol, timol ve gümüş).

Bu nedenle, günümüzde en çok kullanılan kök kanal dolgu simanıdır.

KULLANMA TALİMATLARI

1. Bir karıştırma camı üzerine az miktarda toz ve likit koyunuz;
2. Fleksibl bir spatül kullanarak, karışımı, spatülün cam üzerindeki baskısına engel olmayacak bir viskozite elde edinceye kadar homojenize ediniz; ancak ondan sonra geleneksel tekniklerle kök kanalını doldurmakta kullanılabilir.

ÖZEL TAVSİYELER:

Dolgudan sonra, simanın kalıntılarını uzaklaştırmak için pulpa odasını alkol ile temizleyiniz. Ön dişlerde, dişin servikaline ulaşmasını önlemek için, dolgunun bir bölümünü uzaklaştırınız.

ÖZEL TAVSİYELER:

N – RICKET, içeriğindeki malzemelerden herhangi birine hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

KAREKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER:

- Hızlı sertleşme zamanı
- Kök duvarlarının mükemmel doldurulması
- Antibakteriyel etki
- Radio opak
- Kolay çıkarılabilme