

## ZINC OXIDE Powder Pure - Çinko Oksit, Toz, Saf, Dolgu geçici materyali



**Kod:** 7590

**Paketleme:** Ürün, toz formunda sunulmuştur.

Çinko Oksit: 1 x 50g şişe

**Bileşenleri;**

Zinc Oxide P.A. (99 a 100,5%).

### TANIMLAMA:

Öjenol ile birlikte kullanılması gereken, genel olarak geçici dolgu ve kaide maddesi olarak kullanılan bir tozdur.

### ENDİKASYONLARI:

Geçici dolgu maddesi, kaide materyali, geçici ya da kalıcı simantasyon materyali, kanal dolgu maddesi ya da siman ve cerrahi siman olarak kullanılır.

### TEKNİK BİLGİ

Hafifçe alkaliye kayan ÇİNKO OKSİT ve ÖJENOL ün pH'sı pratikte nötraldir, diğer simanlardan daha az iritandır. Çalışmalar, ürünün kaviteye uygulanmasından sonra, mükemmel bir adaptasyonla minimum sızdırma yaptığını göstermiştir;

### KULLANMA TALİMATLARI

1. Geçici dolgu olarak kullanmak için, karışımın cam plakaya ya da spatüle yapışmayacak bir kıvamda olması gereklidir.
2. Uyuşturucu etki istenen derin kavitelere, pat, ÖJENOLün dentin ile temas etmesine olanak sağlayacak şekilde yumuşak olmalıdır. Bu patın üzerine, daha kıvamlı başka bir tabaka daha koyunuz;
3. Simantasyon ya da kök kanalı doldurmak için, karışım krem görünümünde olmalıdır;
4. Cerrahi siman olarak kullanılacağında, karışım, el ile manüplasyona olanak sağlayacak şekilde yüksek yoğunlukta olmalıdır.

### ÖZEL TAVSİYELER:

Ürüne hassasiyeti olduğu bilinen hastalarda kullanmayınız.

### KARAKTERİSTİKLER / ÖZELLİKLER

- İzolasyon etkisi
- Minimum büzüşmeye sahip
- Optimo marjinal dolgu
- Ağrı kesici etki