

## Ayarlanabilir, dental ölçü kaşığı - OMNI TRAY



### Ürün özellikleri

- İnceltirme derecesine bağlı olarak kontrol edilebilir
- İmplant ( yapay dişlerin ekilmesi ) ölçüsü gibi özel ölçülerin alınması mümkündür
- Steril edilebilir
- Özel bir bölümü sökülerek şekli değiştirilebilir.
- Bütün dişlerin ölçüsü alınabildiği gibi, kısmi bir bölgede çalışırken, sağ ve sol parçalar birbirinden ayrılarak parsiyal ölçü de alınabilir.

### Ek Bilgi

#### Genel ölçü alımı işlerinde kullanımı

- Paketinden çıkarınız
- Boyutuna bağlı olarak hasta ağızına uyumlandırınız
- Çıkıntılı bölümüne bastırarak fikse ediniz
- Genel ölçü kurallarına uygun olarak kullanınız

#### İmplantasyonda Kullanımı

- Paketinden çıkarınız
- Hastanın ağızına yerleştirerek İmplant Materyalinin yerini kontrol ediniz
- İmplantın pozisyonuna göre uygun implant boşluğunu açınız
- Boşluğun pozisyonunun tam olarak uymadığı durumlarda Denture bar kullanarak boşluğu genişletiniz
- Genel ölçü kurallarına uygun olarak kullanınız

#### Kişisel kaşık yapımı

- Paketinden çıkarınız
- Boyutuna bağlı olarak hasta ağızına uyumlandırınız
- Model materyali ya da mum kullanarak, kaşığı bireye uygun olarak şekillendiriniz
- Genel ölçü kurallarına uygun olarak kullanınız

#### Parsiyal ölçülerde kullanımı

- Kaşığın merkezinde yer alan eklemli bağlantı bölümünün bir ucunu, Denture bar kullanarak kesiniz
- Kaşığın merkezinde yer alan eklemli bağlantı bölümünün bir ucunu, Denture bar kullanarak kesiniz
- İki bölümü birbirinden ayırınız
- Sağ ya da sol kaşık parçalarından gerekli olan kullanılarak ölçü tamamlanır.