

DENTAL ÖLÇÜ KAŞIĞI - Ayarlanabilir



Ürün özellikleri

- İnceltirme derecesine bağlı olarak kontrol edilebilir
- İmplant (yapay dişlerin ekilmesi) ölçüsü gibi özel ölçülerin alınması mümkündür
- Steril edilebilir
- Özel bir bölümü sökülerek şekli değiştirilebilir.
- Bütün dişlerin ölçüsü alınabildiği gibi, kısmi bir bölgede çalışırken, sağ ve sol parçalar birbirinden ayrılarak parsiyel ölçü de alınabilir.

Ek Bilgi

Genel ölçü alımı işlerinde kullanımı

- Paketinden çıkarınız
- Boyutuna bağlı olarak hasta ağızına uyumlandırınız
- Çıkıntılı bölümüne bastırarak fikse ediniz
- Genel ölçü kurallarına uygun olarak kullanınız

İmplantasyonda Kullanımı

- Paketinden çıkarınız
- Hastanın ağızına yerleştirerek İmplant Materyalinin yerini kontrol ediniz
- İmplantın pozisyonuna göre uygun implant boşluğunu açınız
- Boşluğun pozisyonunun tam olarak uymadığı durumlarda Denture bar kullanarak boşluğu genişletiniz
- Genel ölçü kurallarına uygun olarak kullanınız

Kişisel kaşık yapımı

- Paketinden çıkarınız
- Boyutuna bağlı olarak hasta ağızına uyumlandırınız
- Model materyali ya da mum kullanarak, kaşığı bireye uygun olarak şekillendiriniz
- Genel ölçü kurallarına uygun olarak kullanınız

Parsiyel ölçülerde kullanımı

- Kaşığın merkezinde yer alan eklemlerli bağlantı bölümünün bir ucunu, Denture bar kullanarak kesiniz
- Kaşığın merkezinde yer alan eklemlerli bağlantı bölümünün bir ucunu, Denture bar kullanarak kesiniz
- İki bölümü birbirinden ayırınız
- Sağ ya da sol kaşık parçalarından gerekli olan kullanılarak ölçü tamamlanır.

