

Bitirme ve Polisaj

Abrasive Steel Strips

Abreziv Çelik & Elmas Bantlar

Abraziv Çelik Bantlar

Alüminyum oksit ile kaplanmış paslanmaz çelik bantlar, **amalgam**la yapılan **restorasyonların** interaprosimal bölgelerinin bitirilmesi için tavsiye edilirler.

Premolar ve molarlara daha kolay adaptasyon için iki değişik boyları mevcuttur.

Elmas Bantlar

Çok ince elmas tanecikleriyle kaplanmış paslanmaz çelik bantlar, her çeşit **dolgu materyaliyle** yapılmış **restorasyonların** bitimi için tavsiye edilirler.

Ortodontik prosedürlerin uygulanmasında da ayrıca çok yardımcıdırlar.



Kullanım Talimatları

- ✓ İki değişik genişlikteki banttın, vakanıza en iyi uyanını seçiniz;
- ✓ Abraziv bandı, abraziv yüzeyi dolguya bakacak şekilde interaprosimal aralığa yerleştiriniz;
- ✓ Bitim yapmak için, bandı dolgu üzerinde ileri geri hareket ettiriniz;
- ✓ Bandın kullanımı esnasında, kontak noktasının korunmasına dikkat ediniz.

Kod Ticari Sunumu

- | | |
|------|---------------------------------------------------|
| 3051 | Abraziv Çelik Bant - 4mm x 150mm'lik 12 adet bant |
| 3052 | Abraziv Çelik Bant - 6mm x 150mm'lik 12 adet bant |
| 3053 | Elmas Bant - 2.5mm x 110mm'lik 12 adet bant |



Felt Discs

Keçe Diskler

Keçe Diskler

Polisaj pastası ile kullanılmak üzere, tamamen doğal yünden imal edilmişlerdir; kompozit, amalgam, metal ve porselenler ile doğal diş minesine kusursuz bir parlaklık verirler .

Doyurulmuş Keçe Diskler

Ultra-fine dehidrate bir polisaj pastası ve yağ ile doyurulmuşlardır. Bu disklerle, polisaj pastasını aktive etmek için sadece bir kaç damla su kullanarak; kompozit, amalgam ve metal yüzeylerde mükemmel bir parlaklık elde edersiniz.



Kullanım Talimatları

- ✓ Keçe diski bir mandrene takınız;
- ✓ Bir kaç damla su ilave ediniz; ve yumuşak ve fasıllı dokunuşlarla dolgu materyalini mükemmel bir şekilde parlatınız.

Kod Ticari Sunumu

- 3041 Doyurulmuş Keçe Disk (12mm) - 24 Adet + mandren
3043 Keçe Çember (12mm) - 12 adet
3044 Keçe Disk (8 mm) - 12 adet



Microcut

El Testeresi

Hastanızın ve kendinizin sağlığını tehlikeye atmadan dolgu maddesi artıklarından kurtulun; hem de aynı zamanda vakit kaybetmeden başarılı bir kontak noktası oluşturabilirsiniz.

Microcut, testere bıçakları ya da elmas zımpara bantları monte edilebilen paslanmaz çelik bir alettir.

Aproksimal bölgelerdeki dolgu artıklarının uzaklaştırılmasında, hasta ve diş hekimi için en güvenli araçtır.

Bıçakların kalınlığı yalnızca 0.05 mm olduğu için, bu işlem kontak noktasındaki ilişkiyi bozmaz.

Elmas zımpara bantları, aproksimal bölgelerdeki bitirme işlemlerinde olduğu kadar, ortodontik prosedürlerde dilimleme yapmanın alternatif bir yolu olarak da sıklıkla kullanılırlar.

Manual Microcut

Bu, el ile kullanılan bir testeredir.



Kullanım Talimatları

- ✓ Microcut testere, interaprosimal bölgede uzaklaştırılacak olan dolgu artığı üzerinde, hafif bir basınç uygulayarak ileri geri hareket ettirilmelidir. Bu aleti kullanmadan önce bir kama yerleştirilerek diş etinin korunması tavsiye edilir. Testerenin ucuna elmas bant takıldığında, kalan artıklar bölgeden uzaklaştırılırken aproksimal bölgedeki dolgunun bitiminin yapılması da mümkün olur; aynı şey bantlama (stripping) için de geçerlidir.

Sterilizasyon yöntemi

Testere, bıçaklar ve elmas bantlar otoklavla sterilize edilebilirler.



Kod Ticari Sunumu

3030	Microcut - 1 testere +1 testere bıçağı+1 elmas bant
3031	Microcut yedek bıçağı 5 adet
3032	Microcut yedek Elmas Bant 5 adet
3033	Mikrocut manuel – 1 adet testere dişli çelik bantlar 4mm x 150mm

Optimize

Kompozit bitim ve polisaj için silikon abreziv parlaticı


Tanımlama

Her tür kompozitin bitim ve polisajı için silikon abreziv parlaticı sistemi.

Optimize, birbirini tamamlayan iki fonksiyonu tek başına gören bir üründür;

- ✓ Silikon uçların kuvvetle bastırılmasıyla kompozit kenarları şekillendirilebilir.
- ✓ Daha az bir basınçla, kompozit mükemmel bir parlaklık kazanır.

Tedavi edilen bölgeye bağlı olarak, dişlerin değişik bölümlerine daha iyi uyum sağlayabilmesi için 3 ayrı formu mevcuttur.

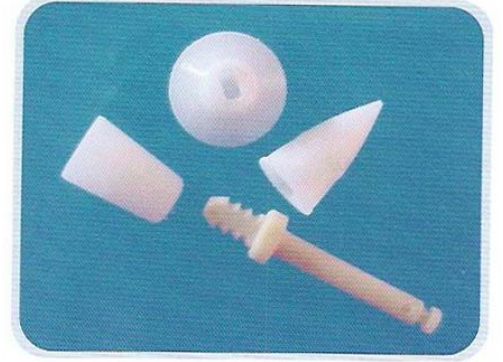

Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni mikromotora takınız ve seçtiğiniz ucu da mandrenin ağzına oturtunuz.
- ✓ Optimize uçları, kurulanmış diş yüzeylerine, düşük ila orta hızlarda ve fasıllı olarak dokunulmak suretiyle uygulanmalıdır.

Sterilizasyon yöntemi

Mandren ve uçlar, otoklavlanabilirler.

Kod Ticari Sunumu

3021	Optimize - 24 adet asorti + mandren
3022S	Optimize 8 adet asorti + mandren
3022C	Optimize 8 adet alev uçlu yedek + mandren
3022D	Optimize 8 adet disk yedek + mandren
3022T	Optimize 8 adet ters konik yedek + mandrel



Polifix

Polisaj Diskleri

Tanımlama

Polifix disklerinin, bir polisaj pastası ile birlikte restoratif materyallerin polisajında kullanılması tavsiye edilir. Disklerin kadifemsi yüzeyi, pastanın disk üzerine retansiyonunu sağlayarak, işlemi kolay, hızlı ve ekonomik hale getirir.

Disklerin yüksek derecede esnek oluşu ve inceliği, onların diş formlarına uyum sağlayabilmelerine ve inter – aproksimal bölgelere ulaşabilmelerine olanak verir. Böylece dolgu yüzeyinde kusursuz bir parlaklık sağlanır.



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni angldruvaya takınız ve mandrenin serbest ucuna diskin esnek tutucusunu oturtunuz.
- ✓ Diskin üzerine bir damla polisaj pastası koyunuz ve ardından düşük hızla çalışarak, hafif ve fasıllı temaslara diş parlatınız.

Kod Ticari Sunumu

3046 Polifix – Kadifemsi disk (12,7mm) 24 adet + mandren




Poligloss

Polisaj Pastası

Tanımlama

Genel dişhekimliği ve laboratuvar kullanımı için ultra fine polisaj pastası.

Poligloss, kompozit, amalgam ve metallerin yüzeylerinde mükemmel bir parlaklık sağlar.

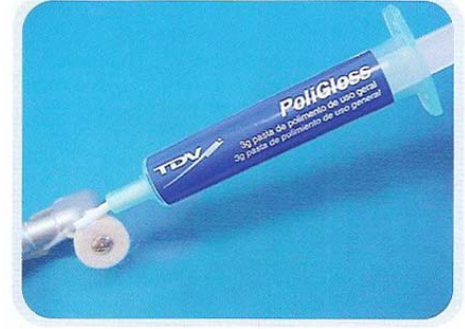

Kullanım Talimatları

- ✓ Restorasyon yüzeyinin son polisajında en iyi sonucu elde edebilmek için, Poligloss polisaj pastası uygulaması, keçe veya kadifemsi bir disk ile yapılmalıdır.
- ✓ Mandreni ve keçe diski angidruvaya takınız, disk üzerine bir damla Poligloss koyunuz ve diş yüzeyine yaptığınız yumuşak ve fasıllı dokunuşlarla mükemmel parlaklık oluşturunuz.



Kod **Ticari Sunumu**
3042 Polisaj pastası– 3 gram.

Polimax

Polisaj pastası emdirilmiş polisaj için keçe diskler

Tanımlama

Polimax, kullanıcısına, her tür dolgu malzemesinin mükemmel bir şekilde polisajlanabilmesi için rahat, hızlı, temiz ve kolay bir yol sunar.

Ayrıca, braketlerin sökülmesinin sonrasında mine yüzeylerinin parlatılması işleminde olduğu kadar, beyazlatma işlemlerinin ardından da kullanımı çok yararlıdır.

Doğal yünden yapılmış keçe ve önceden emdirilmiş ultra fine polisaj pastasının mükemmel kombinasyonu sayesinde, Polimax disklerinin kullanımı son derece kolay ve etkilidir.

Polimax disklerinin kullanımı, metal parça içermeyen ve disklerin mandrene kolayca takılabildiğini sağlayan Versaplustan mandren sistemi yardımıyla kolaylaştırılmıştır.



Kullanım Talimatları

- ✓ Versaplustan mandreni mikromotora takınız;
- ✓ Mandrenin serbest ucuna, diskin arka yüzünde yer alan esnek tutucuyu oturtmak suretiyle Polimax diski mandrene takınız;
- ✓ Bir kaç damla su ile diski nemlendiriniz ve düşük hızda çalışarak, hafif ve fasıllı temaslara uygulayınız.

Kod Ticari Sunumu

- 3045 Polimax – Doyurulmuş keçe disk 24 adet + mandren
3048 Polimax - Doyurulmuş keçe disk 12 adet + mandren



Praxis

Kompozit dolgu bitim ve polisaj diskleri

Tanımlama

Kompozit dolguların bitim ve polisaj işlemlerinde kullanılır.

Bu sistem, renklerle kodlanmış dört ayrı kalınlıkta zımpara diskleri ile; yalnızca basınç uygulandığında çalışan ve böylece, gerektiğinde disk değiştirme işlemini ve aşındırıcı yüzeylerin değiştirilmesini gerçekten çok hızlandırıp, kolaylaştıran bir mandrenden müteşekkildir.

Disklerin iki farklı çapta olmalarının sağladığı avantaj (1/2" & 3/8"), posterior bölgeler de dahil, ağızdaki tüm bölgelere rahatlıkla ulaşılabilmesine olanak verir .



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni angldrüvaya takınız;
- ✓ Diski mandrene yerleştiriniz;
- ✓ Daha iyi bir sonuç almak için, 4 ayrı kalınlıktaki diski, kalından inceye doğru sırasıyla kullanınız;
- ✓ Bu ürün, kuru olarak, yavaş ila orta hızlarda çalışılarak ve fasilalı dokunuşlarla kullanılmalıdır;
- ✓ Mandren sterilize edilebilir.

Kod Ticari Sunumu

3001	Praxis x 120 adet asorti + mandren
3002	Praxis x 60 adet asorti + mandren
3003	(G / M / F / EF) Praxis yedek - 3/8" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 30 adet
3004	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 1/2" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 30 adet
3007	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 3/8" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 50 adet
3008	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 1/2" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 50 adet
3009	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 3/8" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 85 adet
3010	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 1/2" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 85 adet



Praxis Polish

Polisaj diskleri

Tanımlama

Praxis Polish diskleri, bir polisaj pastası yardımıyla dolgu maddelerinin parlatılması amacıyla kullanılır.

Pastayı tutan kadifemsi disk yüzeyi, temiz ve ekonomik bir çalışma yapmanızı temin eder.

Disklerin esnekliği dental konturlara adapte olabilmesine olanak verir ve böylece, mükemmel bir parlatma yapılarak dolgu yüzeyi iyi derecede parlatılabilir.



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni angldravyaya takınız ve diski, mandrenin serbest ucuna bastırarak tutturunuz;
- ✓ Bitirme ve polisaj işlemlerinde daha iyi bir sonuç elde etmek için, kalın olandan başlayıp inceye doğru devam ederek, dört ayrı kalınlıktaki diskleri sırasıyla kullanmanız tavsiye edilir ;
- ✓ Praxis diskleri, kuru olarak, düşük hızda ve aralıklı olarak uygulanan hafif dokunuşlarla kullanılmalıdır.

Kod Ticari Sunumu

3047 Praxis Polish – kadifemsi disk x 12,7 mm, 24 adet



Proximal Finishing Sandpaper Strips

Aproximal bitirme için zımpara bantlar

Tanımlama

Aproksimal bölgelerdeki kompozit dolguların bitirme ve polisaj işlemleri için kullanılırlar.

Ortasında, interdental aralığa bandın yerleştirilmesini kolaylaştıran nötral bir bölüm vardır ve bunun iki tarafı, 2,5 ve 4 mm genişliğinde orta ve ince büyüklükteki grenlerle kaplanmıştır.



Kullanım Talimatları

- ✓ Bandı, ortasında yer alan nötral bölümünü kullanarak interaproximal bölgeye yerleştiriniz;
- ✓ Önce orta kalınlıktaki grenlerin olduğu bölümden başlayıp, ince bölümle devam ederek, ileri geri hareketlerle aproksimal bölgeyi zımparalayınız;
- ✓ Polisaj işlemi tamamlandığında, nötral bölgeyi kullanarak zımparayı çıkartınız.

Kod Ticari Sunumu

3061	Zımpara bandı - 150 adet 2.5mm x 170mm
3062	Zımpara bandı - 150 adet 4mm x 170mm
3065	Zımpara bandı - 100 adet 2.5mm x 170mm
3066	Zımpara bandı - 100 adet 4mm x 170mm



Superfix

Bitirme ve polisaj için zımpara diskler

Tanımlama

Daha iyi ve güvenli bitirme ve polisaj işlemleri yapabilmek amacıyla, diskin parlatici yüzeyinin optimizasyonu ve çizik oluşturma ihtimalinin giderilmesi düşüncesiyle üretilmişlerdir. Superfix sistemi, arka ucunda, kendisini Versaplast mandrenine takmanız için bir kaide görevi gören esnek bir tutucusu olan zımpara disklerinden oluşur.

9.5mm ve 12.7mm lik iki farklı çapı ve renkleriyle ayırt edilen dört değişik kalınlığı, uygulayıcısının ağız içindeki hemen her bölgeye ulaşabilmesini sağlar.



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni angldruvaya takınız ve mandrenin serbest ucuna diskin esnek tutucusunu tutturunuz;
- ✓ Bitirme ve polisaj işleminde daha iyi bir sonuç elde etmek için, kalın olandan başlayıp inceye bitirerek, dört ayrı kalınlıklı diski sırasıyla kullanmanız tavsiye edilir;
- ✓ Superfix diskleri, kuru olarak, düşük hızda ve aralıklı olarak uygulanan hafif dokunuşlarla kullanılmalıdır.

Kod

Ticari Sunumu

3015	Superfix - 50 adet asorti zımpara disk + mandren
3015G	Superfix - 50 kalın zımpara disk + mandren
3015M	Superfix - 50 orta zımpara disk + mandren
3015F	Superfix - 50 ince zımpara disk + mandren
3015XF	Superfix - 50 ekstra-ince zımpara disk + mandren



TDV Sandpaper Discs

TDV Kompozit bitim ve polisaj zımpara diskleri

Tanımlama

Kompozit çalışmalarının bitim ve polisajları için hazırlanmış, 12mm, 16mm ve 19mm çaplarında ve renkleri ile ayırt edilen 4 farklı kalınlıkta zımpara diskleridirler.



Kullanım Talimatları

- ✓ Kullanmak istediğiniz diski standart bir mandrene takınız;
- ✓ Daha iyi bir sonuç elde etmek için en kalından başlayıp en incesine doğru devam ederek 4 ayrı kalınlıktaki diski de kullanınız;
- ✓ Bu ürün kuru olarak, yavaş ila orta hızla ve fasıllı dokunuşlarla kullanılmalıdır.

Kod Ticari Sunumu

3026	Asorti zımpara disk 1.6mm - 50 adet
3026	(G / M / F / XF) - 50 adet zımpara disk 16mm
3027	Asorti zımpara disk 12 mm - 50 adet
3027	(G / M / F / XF) - 50 adet zımpara disk 12mm
3028	Asorti zımpara disk 19mm - 50 adet
3028	(G / M / F / XF) - 50 adet zımpara disk 19mm
3029	Asorti zımpara disk 16 mm - 100 adet
3029	(G / M / F / XF) - 100 adet zımpara disk 16mm



