

## Microcut

### El Testeresi

Hastanızın ve kendinizin sağlığını tehlikeye atmadan dolgu maddesi artıklarından kurtulun; hem de aynı zamanda vakit kaybetmeden başarılı bir kontak noktası oluşturabilirsiniz.

Microcut, testere bıçakları ya da elmas zımpara bantları monte edilebilen paslanmaz çelik bir alettir.

Aproksimal bölgelerdeki dolgu artıklarının uzaklaştırılmasında, hasta ve diş hekimi için en güvenli araçtır.

Bıçakların kalınlığı yalnızca 0.05 mm olduğu için, bu işlem kontak noktasındaki ilişkiyi bozmaz.

Elmas zımpara bantları, aproksimal bölgelerdeki bitirme işlemlerinde olduğu kadar, ortodontik prosedürlerde dilimleme yapmanın alternatif bir yolu olarak da sıklıkla kullanılırlar.

#### Manual Microcut

Bu, el ile kullanılan bir testeredir.



### Kullanım Talimatları

- ✓ Microcut testere, interaproksimal bölgede uzaklaştırılacak olan dolgu artığı üzerinde, hafif bir basınç uygulayarak ileri geri hareket ettirilmelidir. Bu aleti kullanmadan önce bir kama yerleştirilerek diş etinin korunması tavsiye edilir. Testerenin ucuna elmas bant takıldığında, kalan artıklar bölgeden uzaklaştırılırken aproksimal bölgedeki dolgunun bitiminin yapılması da mümkün olur; aynı şey bantlama (stripping) için de geçerlidir.

#### Sterilizasyon yöntemi

Testere, bıçaklar ve elmas bantlar otoklavla sterilize edilebilirler.

#### Kod Ticari Sunumu

- |      |   |
|------|---|
| 3030 | Microcut - 1 testere +1 testere bıçağı+1 elmas bant                 |
| 3031 | Microcut yedek bıçağı 5 adet  |
| 3032 | Microcut yedek Elmas Bant 5 adet                                    |
| 3033 | Mikrocut manuel – 1 adet testere dişli çelik bantlar<br>4mm x 150mm |

