

Polifix

Polisaj Diskleri

Tanımlama

Polifix disklerinin, bir polisaj pastası ile birlikte restoratif materyallerin polisajında kullanılması tavsiye edilir. Disklerin kadifemsi yüzeyi, pastanın disk üzerine retansiyonunu sağlayarak, işlemi kolay, hızlı ve ekonomik hale getirir.

Disklerin yüksek derecede esnek oluşu ve inceliği, onların diş formlarına uyum sağlayabilmelerine ve inter – aproksimal bölgelere ulaşabilmelerine olanak verir. Böylece dolgu yüzeyinde kusursuz bir parlaklık sağlanır.



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni angldrüvaya takınız ve mandrenin serbest ucuna diskin esnek tutucusunu oturtunuz.
- ✓ Diskin üzerine bir damla polisaj pastası koyunuz ve ardından düşük hızla çalışarak, hafif ve fasıllı temaslara diş parlatınız.

Kod Ticari Sunumu

3046 Polifix – Kadifemsi disk (12,7mm) 24 adet + mandren

