

Praxis

Kompozit dolgu bitim ve polisaj diskleri

Tanımlama

Kompozit dolguların bitim ve polisaj işlemlerinde kullanılır.

Bu sistem, renklerle kodlanmış dört ayrı kalınlıkta zımpara diskleri ile; yalnızca basınç uygulandığında çalışan ve böylece, gerektiğinde disk değiştirme işlemini ve aşındırıcı yüzeylerin değiştirilmesini gerçekten çok hızlandırıp, kolaylaştıran bir mandrenden müteşekkildir.

Disklerin iki farklı çapta olmalarının sağladığı avantaj (1/2" & 3/8"), posterior bölgeler de dahil, ağızdaki tüm bölgelere rahatlıkla ulaşılabilmesine olanak verir .



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni angldruvaya takınız;
- ✓ Diski mandrene yerleştiriniz;
- ✓ Daha iyi bir sonuç almak için, 4 ayrı kalınlıktaki diski, kalından inceye doğru sırasıyla kullanınız;
- ✓ Bu ürün, kuru olarak, yavaş ila orta hızlarda çalışılarak ve fasıllı dokunuşlarla kullanılmalıdır;
- ✓ Mandren sterilize edilebilir.

Kod Ticari Sunumu

3001	Praxis x 120 adet asorti + mandren
3002	Praxis x 60 adet asorti + mandren
3003	(G / M / F / EF) Praxis yedek - 3/8" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 30 adet
3004	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 1/2" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 30 adet
3007	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 3/8" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 50 adet
3008	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 1/2" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 50 adet
3009	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 3/8" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 85 adet
3010	(G / M / F / EF) - Praxis yedek - 1/2" (Kalın, Orta, İnce, Ekstra - İnce) - 85 adet

