

Praxis Polish

Polisaj diskleri

Tanımlama

Praxis Polish diskleri, bir polisaj pastası yardımıyla dolgu maddelerinin parlatılması amacıyla kullanılır.

Pastayı tutan kadifemsi disk yüzeyi, temiz ve ekonomik bir çalışma yapmanızı temin eder.

Disklerin esnekliği dental konturlara adapte olabilmesine olanak verir ve böylece, mükemmel bir parlatma yapılarak dolgu yüzeyi iyi derecede parlatılabilir.



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandreni angldrüvaya takınız ve diski, mandrenin serbest ucuna bastırarak tutturunuz;
- ✓ Bitirme ve polisaj işlemlerinde daha iyi bir sonuç elde etmek için, kalın olandan başlayıp inceye doğru devam ederek, dört ayrı kalınlıktaki diskleri sırasıyla kullanmanız tavsiye edilir ;
- ✓ Praxis diskleri, kuru olarak, düşük hızda ve aralıklı olarak uygulanan hafif dokunuşlarla kullanılmalıdır.



Kod Ticari Sunumu

3047 Praxis Polish – kadifemsi disk x 12,7 mm, 24 adet