

## Contact+

### Kompozit restorasyonlarda, kontak noktaları aleti

#### Tanımlama

Kompozit restorasyonlarda sıkı kontak noktaları oluşturmanın zorluğu, bu tür uygulamalardaki başarısızlığın ana sebebidir. Contact + , uygulayıcının işlemi üç kolay adımda tamamlamasını sağlayarak bu sorunu çözmek amacıyla dizayn edilmiştir.

Contact + , biri küçük kavite (S), ve diğeri de büyük kavite (B) için olmak üzere iki aletlik bir setten oluşur.



Foto 1. Kavitenin ilk görünüşü.



Foto 2. Proksimal kontakların rekonstrüksiyonu için alet rezin üzerinde pozisyonlandırılır.

Foto 3. Proksimal kontak rekonstrüksiyon detayı.



#### Kullanım talimatları

- ✓ Contact + kullanılmadan önce, kaviteye en azından bir tabaka kompozit uygulanmış ve polimerize edilmiş olmalıdır.
- ✓ Kaviteye, aletin ucunu kaplamaya yetecek miktarda, küçük bir parça kompozit yerleştiriniz.
- ✓ Aleti, kavitenin içindeki kompozite değdiriniz ve matriks komşu dişle kontak elde edene kadar, orta derecede bir kuvvet uygulayınız; aleti bu kontak pozisyonunda tutmaya devam ederek kompoziti aletin üzerinden ışınlayınız. Kompozit donduktan sonra, baskıyı kesin ve aleti kaviteden uzaklaştırınız.
- ✓ Alet tarafından oluşturulan rezin çatısı, matriksi kontak pozisyonunda tutacaktır.
- ✓ Her zamanki prosedürleri uygulayarak dolguyu bitiriniz.

#### Sterilizasyon yöntemi

Aletler otoklavlanabilirler.



#### Kod Ticari Sunumu

4202 Contact + - 2 altten oluşan bir set