


## Fotoplus

### Class II kompozit restorasyon el aletleri

Class II kompozit restorasyonların başarısızlığındaki ana sebeplerden biri olan marjinal servikal infiltrasyonu azaltmayı sağlayacak bir yöntem bulmak için büyük çabalar sarf edilmiştir.

Günümüzde bilindiği gibi, kompozitin ilk tabakasının ışınlanması esnasında basınç altında tutulmasının mikro infiltrasyon riskini azalttığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır ; (CALIXTO, A..L.; CÂNDIDO, M.S.M.; MAZUR, R.F.; JBC, v.5, n.30, p.491-7, Dec. /Jan. 2002).

Şeffaf yapıdaki ve dört değişik uca sahip **Fotoplus** el aletleri, özellikle bu teknikle kullanılarak; kompozitin içinde hava kabarcığı kalması; uygulanan ilk tabakanın kavite tabanına yapışmaması riskini önlemek, vs. için geliştirilmişlerdir.

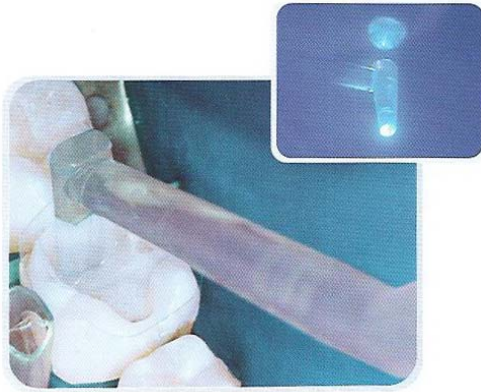

### Kullanım Talimatları

- ✓ Doldurulan kavitenin şekline en iyi uyan ucu seçiniz; ilk tabaka kompozit dolguyu kaviteye yerleştiriniz ve bunu ışıkla polimerize ederken hafif bir basınç altında tutunuz.
- ✓ Kompozit sertleştiğinde baskıyı kesiniz ve el aletini kaviteden uzaklaştırınız.

### Sterilizasyon yöntemi

Fotoplus el aletleri otoklavlanabilirler.



### Kod Ticari Sunumu

4201 Fotoplus – 2 aletlik set