

## Elastic Wedges

## Elastik Kamalar

TDV Elastik Kamaları, restoratif işlemlerde genel kullanım için endikedirler; matriksleri adapte etmek ve/veya komşu dişi separe etmek gibi mekanik fonksiyonları vardır. Renklerle kodlanmış üç değişik boyutta üretilirler.



Derin  
kaviteler için



Orta derinlikteki  
kaviteler için



Derin olmayan  
kaviteler için



### Kullanım Talimatları

İşlem için gerekli elastik kamayı seçiniz;

1. Klemp pensi ile kamayı iki büyük deliğinden tutunuz;
2. Kamayı, orta bölümü dişlerin arasından geçecek inceliğe ulaşıncaya kadar çekerek uzatınız;
3. Kamayı interdental aralığa yerleştiriniz ve pensi kamadan ayırınız;
4. İşlem tamamlandıktan sonra, kamayı bir ucundan çekiniz ve orta bölümünden kesiniz;

Kalan bölümleri hastanın ağızından çıkartınız.

### Kod Ticari Sunumu

4801 Asorti kit - 75 adet



4802 Asorti Elastik Kamalar - 25 adet

4803 Elastik Kamalar 2,0mm (yeşil) - 25 adet

4804 Elastik Kamalar 2,6mm (sarı) - 25 adet

4805 Elastik Kamalar 3,2mm (mavi) - 25 adet

