

Matrices

Matriksler

Sabitleme sistemi entegre edilmiş Şeffaf Matriksler

TDV Şeffaf Matriksleri, Class II tip restorasyonlarda, ışıkla polimerize edilen kompozitlerle birlikte kullanılmak üzere özel olarak dizayn edilmişlerdir.

Restorasyonun kalitesini optimize ederler, ayrıca da işlem süresini azaltırlar. Önceden hazırlanmış şekilleri, kontak noktalarının yeniden oluşturulması için idealdir.

Aynı zamanda, matriksin dişin boyutlarına göre ayarlanmasını sağlayan birleşik bir sabitleme sistemleri de vardır ki bu, ilave bir matriks taşıyıcısına gerek bırakmaz.

Sabitleme sistemi entegre edilmiş Metal Matriksler

TDV Metal Matriksleri, özellikle Class II restorasyonlarda kullanılmak üzere dizayn edilmişlerdir. Restorasyonun kalitesini optimize ederler, ayrıca sahip oldukları sabitleme sisteminin kolay uygulanabilmesi sayesinde işlem süresini azaltırlar. 0,05mm'lik kalınlıkları daha iyi kontak noktaları oluşturulmasını kolaylaştırır, ve sahip oldukları sabitleme sistemi, matriksin dişte gayet kolayca ve sıkıca ajuste edilmesini sağlar ve başka bir matriks tutucu sistemin kullanılmasını gerektirmez.



Kullanım Talimatları

- ✓ Kamayı yerleştiriniz. Anestezinin ardından matriksin yerleştirilmesine kadar kamanın interdental aralıkta tutulması (pre-wedging) önerilir;
- ✓ Matriks, metal halkası ihtiyaca bağlı olarak linguale ya da vestibüle bakacak şekilde yerleştirilir;
- ✓ Metal halka sıkıştırılarak matriksin adaptasyonu sağlanır. Ardından, deforme olmuş olan bu halka uzantısı, kenara doğru yatırılabilir;
- ✓ Gerekliğinde, bir tampon ya da sond yardımıyla matriks formunda küçük düzeltmeler yapılabilir;
- ✓ İşlem tamamlandıktan sonra, dolguya zarar vermeden matriksin çıkarılması için sabitleme sisteminin uzantısı kesilir.

Kod Ticari Sunumu

4102	Premolarlar için sabitleme sistemli Polyester Matriks - 20 adet
4103	Molarlar için sabitleme sistemli Polyester Matriks - 20 adet
4106	Sabitleme sistemli Pedodontik Polyester Matriks - 20 adet
4107	Premolarlar için sabitleme sistemli Metal Matriks - 20 adet
4108	Molarlar için sabitleme sistemli Metal Matriks - 20 adet
4127	Şekillendirilmiş Premolar Bant - 20 adet
4128	Şekillendirilmiş Molar Bant - 20 adet



Matriks bantları

Tanımlama

Kontak noktalarının yeniden oluşturulması için ideal olan önceden hazırlanmış şekilleri sayesinde restorasyonun kalitesini optimize ederler. Tofflemire tipi gibi bir matriks taşıyıcısı ile dişe sabitlenmeleri gerekir.



Ticari Sunumu

4127 - Şekillendirilmiş Premolar Bant - 20 adet

4128 - Şekillendirilmiş Molar Bant - 20 adet

Kullanım talimatları

- Matriks bandını matriks taşıyıcısına takınız;
- Matriks taşıyıcısı ve matriks bandını interaprosimal bölgeye yerleştiriniz;
- Dişe adapte ediniz;
- Anatomik kamayı aproksimal aralığa yerleştiriniz ve dolgu işlemini gerçekleştiriniz;
- Restorasyon tamamlandıktan sonra kamayı ve matriks setini çıkarınız;
- Bitirme ve polisaj işlemlerini uygulayınız.