

Unimatrix

Class II restorasyonlar için matriks sistemi

Tanımlama

Class II tip restorasyonlarda kontak noktalarının yeniden oluşturulması işleminde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş bölümlü matriks sistemidir.

Yerleştirilmesi kolay ve pratiktir; gingival bölgeyi zedelemeyiz; hastayı travmatize etmez; özel konveksitesi ve 0,05mm'lik kalınlığı sayesinde mükemmel bir şekil ve kontak noktası ilişkisi elde edilmesini sağlar; kavitenin doldurulmasından sonra zaman ve aşındırıcı madde israfına engel olur.



Kullanım Talimatları

- ✓ Kaviteye en iyi uyum matriks boyunu seçiniz, matriksi yerleştiriniz, kama koyunuz, ve herhangi bir klemp pensi yardımıyla sabitleme yüzüğünü yerleştiriniz; bu yüzük iki işlev görecektir: matriksi istenen pozisyonda tutmak, ve ayrıca komşu dişi uzaklaştırmak.
- ✓ Kavitenin doldurulması tamamlandığında önce klemp, sonra kamayı ve en son olarak da matriksi çıkartınız, .

Sterilizasyon yöntemi

Klemp otoklavlanabilirler.



Kod Ticari Sunumu

- 4122 Unimatrix Mini - Set - 25 asorti matriks + 1 klemp
- 4124 Unimatrix - 50 asorti matriks + 2 klemp
- 4125 Unimatrix yedek 50 matriks (asorti, küçük, orta, büyük)
- 4126 Unimatrix klemp - 2 adet.