

Profilax

Profilaksi için silikon uçlar

Tanımlama

Profilaksi işlemlerini gerçekleştirmek için aşındırıcı olmayan silikon uçlar.

Bu sistem, %100 silikondan üretilmiş olması sayesinde Versaplast mandren sistemi ile birlikte çok kolay kullanılır, ve bu sistem, angidruvanın içine sıvı infiltrasyonuna engel olarak, özel bir koruma sağlayan ve bu aletin ömrünü uzatan tek sistemdir.



Kullanım Talimatları

- ✓ Mandrenin arkasını angidruvaya yerleştiriniz ve kullanmak istediğiniz ucu Versaplast mandreninin diğer ucuna takınız; bunun ardından profilaksi pastasını ilave ediniz ve düşük hızda çalışarak kısa aralıklarla ucu uygulayınız.

Kod Ticari Sunumu

3045 4 adet ters konik + konik şekilli uç + Versaplast mandren.





Perpa Ticaret Merkezi, B-Blok, Kat:11, No:1743, Okmeydanı, İSTANBUL
Tlf: 0212 3207370 (PBX), Fax: 0212 3207782

www.pro-tektibbicihaz.com info@pro-tektibbicihaz.com sale@pro-tektibbicihaz.com